


子宮頸部・頸管内細胞採取器具

Rovers® Cervex-Brush® Combi クラスⅠ 一般医療機器 医療機器届出番号27B1X00021000069

サーベックスブラシコンビは

- 頸部細胞の採取にはサーベックスブラシの構造を、頸管部細胞の採取にはエンドサーベックスブラシの技術を組み合わせたブラシです。
- 毛先が柔らかく部位の損傷を最小限にします。従来のへらやナイロンブラシと比較しても出血が少なく、コルポスコプ検診の妨げになりません。
- 子宮頸部並びに頸管内の2箇所から同時に、しかも1度の動作で必要十分な細胞を的確に採取します。

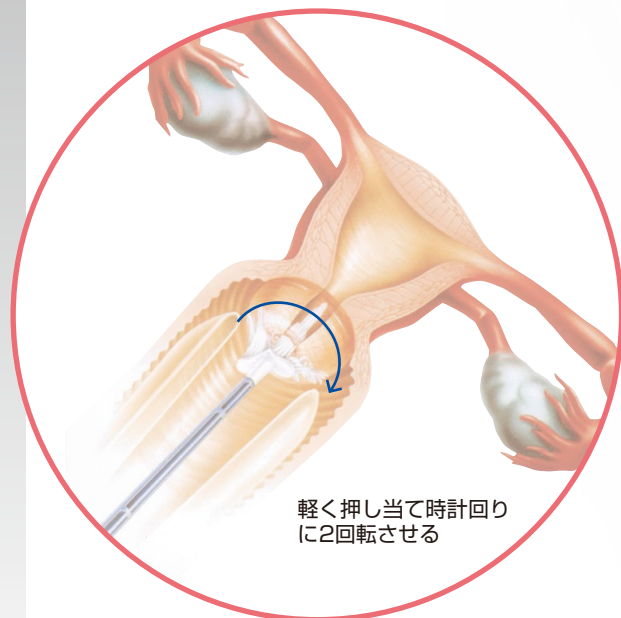

軽く押し当て時計回りに2回転させる

〈仕様・形状〉



※エチレンオキサイドガス滅菌済み

商品コード	商品名	梱包単位
3060-003	サーベックスブラシコンビ	100本/箱 20箱/カートン

Cervex-Brush®, Cervex-Brush® Combiを用いた際の採取細胞数比較

	Cervex-Brush®	Cervex-Brush® Combi
Number of slides	100	100
Squamous cells(per slide)	54,963	54,595
95% CI	50,805-59,120	49,861-59,328
Endocervical cells(per slide)	371	981※
95% CI	241-501	740-1,221
Total cells per slide	55,334	55,575
95% CI	51,188-59,479	50,820-60,331

※p=0.00001、t=4.483、d.f.=197.

Depuydt C. E. et al. Cytopathology 17(6), 374-381. 2006

●品質改良のため、仕様・外観を予告なしに変更することがありますのでご了承ください。



原田産業株式会社 メディカルチーム
〒542-0081 大阪市中央区南船場2丁目10番2号
Tel: (06) 6244-0978
Fax: (06) 6244-0977
<http://medical.haradacorp.co.jp/>

Rovers® Cervex-Brush® シリーズ

子宮頸部・頸管内細胞採取器具

従来法およびリキッドベース標本作成に最適！



サーベックスブラシ



エンドサーベックスブラシ



サーベックスブラシコンビ

子宮頸がん検診の為の細胞採取器具です。

子宮頸部／頸管内の細胞採取に於いて、
従来の綿棒・へら・ラウンドブラシ等の採取器具にあった問題点、
難点を解消する最良のサンプラーです。




子宮頸部・頸管内細胞採取器具



Rovers® Cervex-Brush® クラスⅠ 一般医療機器 医療機器届出番号27B1X00021000067

サーベックスブラシは

- 毛先が柔らかく部位の損傷を最小限にします。従来のへらやナイロンブラシと比較しても出血が少なく、コルポスコブ検診の妨げになりません。
- 子宮頸部並びに頸管内の2箇所から同時に、しかも1度の動作で、必要十分な細胞を、的確に採取します。
- 標本作成時間の短縮を可能にします。
- 従来の標本作製方法同様、リキッドベースでの標本作製方法でも使用できます。
- リキッドベースでの標本作製方法で用いる場合は、細胞採取後に先端部分を柄から分離します。

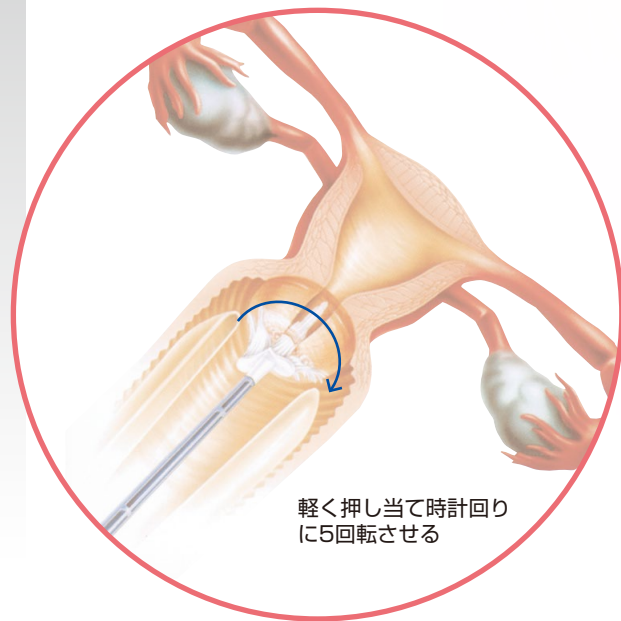


〈仕様・形状〉

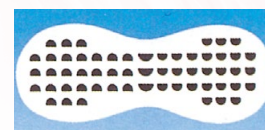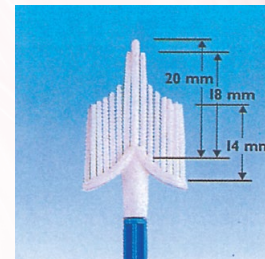

※エチレンオキサイドガス滅菌済み

商品コード	商品名	梱包単位
3060-000	サーベックスブラシ	100本/箱 20箱/カートン

従来の標本作製方法

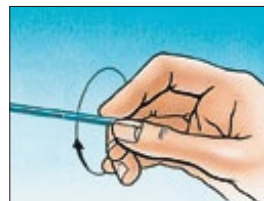

細胞を採取します。




細胞が乾燥しないうちに、スライドグラスにブラシを押し当て引きながら回転させます。外側に頸部の細胞が、内側に頸管細胞がそれぞれ塗布されます。



塗布した細胞が乾かないうちに市販の固定液で固定してください。




リキッドベースでの標本作製方法

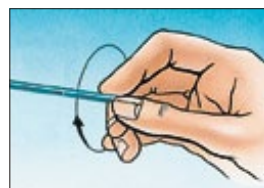

細胞を採取します。



ブラシをバイアルへ入れ左右に回転させ、細胞を洗い落としてください。

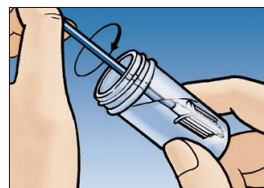

図のようにしてブラシの先端を抑え、柄を引きます。ブラシ部分が簡単に外れ落ちます。その後しっかり蓋を閉めてください。


*左記はサーベックスブラシの例です。エンドサーベックスブラシ/サーベックスブラシコンビでも同様におこなうことができます。

子宮頸管内細胞採取器具

Rovers® EndoCervex-Brush® クラスⅠ 一般医療機器 医療機器届出番号27B1X00021000068

エンドサーベックスブラシは

- ブラシ部分は柔らかく部位の損傷を軽減します。
- 細かい毛により十分な細胞を採取します。
- ブラシと柄の間に安全リングが付いており、採取中にブラシが子宮内膜まで入り込むことを防ぎます。
- 閉経後の細胞採取にも最適です。
- 通常サイズと、頸管部の細い受診者に適したSサイズの2種類があります。

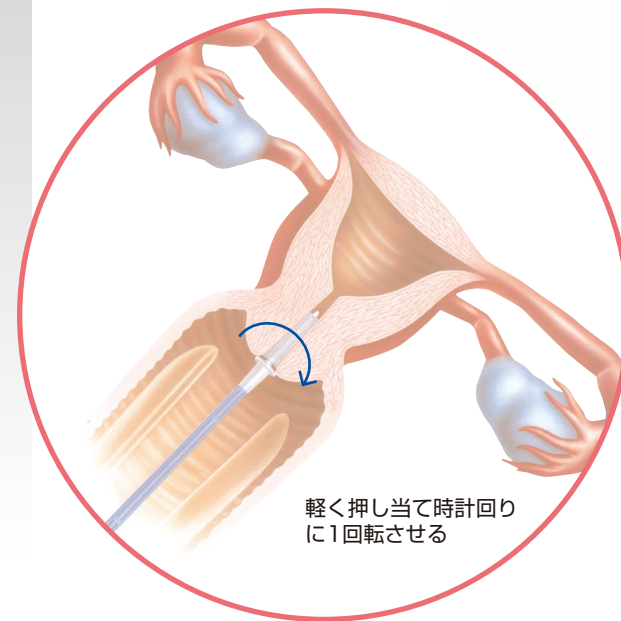

エンドサーベックスブラシ



〈仕様・形状〉

両サイドに細く柔らかい毛



安全リング




エンドサーベックスブラシS




※エチレンオキサイドガス滅菌済み

商品コード	商品名	梱包単位
3060-001	エンドサーベックスブラシ	100本/箱 20箱/カートン
3060-002	エンドサーベックスブラシSサイズ	100本/箱 20箱/カートン


いろいろな細胞採取器具

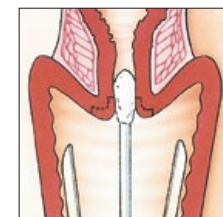


綿棒

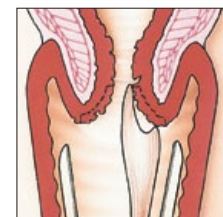


木ベラ

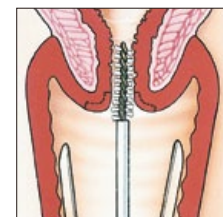


ラウンドブラシ

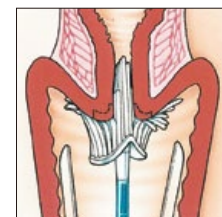

サーベックスブラシ

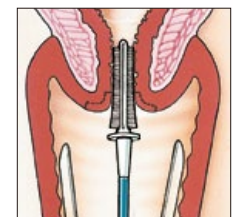

エンドサーベックスブラシ

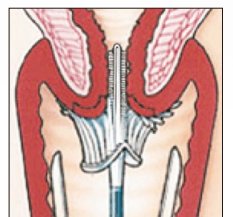

サーベックスブラシコンビ

References

1. 細胞採取法の違いによる子宮頸部細胞診標本の適切性の比較検討：土岐利彦、熊谷幸江、高坂公雄、川嶋博、方山揚誠：日本臨床細胞学会雑誌31;3; 1992年5月22日
2. 新しい細胞採取器具サーベックスの使用経験：土岐利彦、倉本雅規、菊池岩雄、佐藤重美：産婦人科の実験 41;12; 1992年11月1日
3. 液状処理細胞診(Sure Path法)の試験的運用：神奈川県予防医学協会 平成19年度事業年報：岩見美子、杉本直子、加藤ちづ代、坂野みどり、蔵本博行、野田信之、飯田萬一他
4. Comparison of the efficacy of the cervix brush and the extended-tip wooden spatula with conventional cytology: A longitudinal study : Whitaker CJ, Stamp EC, Young W, Greenwood LA : Cytojournal : 2009 Jan. 19;6;2.
5. Collection of BD SurePath Test with a broom device plus endocervical brush improves disease detection when compared to the broom device alone or the spatula plus endocervical brush combination : Davis-Devine SJ, Anderson A, Freund GG 他: Cytojournal : 2008;Feb.12;6;4
6. Improved endocervical sampling and HPV viral load detection by Cervex-Brush Kombi. : Depuydt CE, Benoy IH, Bailleul EJ, Vandepitte J, Vereecken AJ, Bogers JJ : Cytopathology 2006 Dec;17(6) : 374-81