

機械器具(42) 類別名称 医療用剥離子
一般医療機器
一般的名称:婦人科用剥離子 JMDNコード:70955000

エヴァリンブラシ


再使用禁止

**【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止
- ・生理中は使用しないこと。[正しい検査結果が得られない可能性があるため]
- ・妊娠中および妊娠期間終了後3ヵ月は使用しないこと。[安全性が確立されていないため]
- ・使用前の最低2日間は、膣洗浄器や膣錠等他の膣用製品を使用しないこと。[正しい検査結果が得られない可能性があるため] (コンドームおよび水性潤滑剤は、通常通り使用できる。)

*【形状・構造及び原理等】

1. 構成
エヴァリンブラシ
2. 形状
エヴァリンブラシ

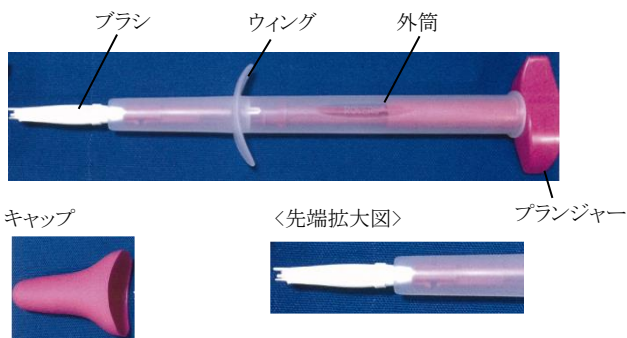

<原材料>

ポリエチレン(血液、体液等生体に接触する部分のみ)

3. 原理
器具先端に柔軟性のあるブラシが付いており、処置部で擦ることにより、細胞を採取する。

【使用目的又は効果】

本品は、細胞学的診断に供する粘膜細胞組織を子宮から採取するために用いる器具である。本品は単回使用である。

*【使用方法等】

1. 使用前に手を洗い、清潔な状態にする。
2. 本品をケースから取り出す。ケースは捨てないこと。
3. キャップをつまみ本体から取り外す。ブラシ先端に触れないように注意すること。
4. 陰唇を開き、エヴァリンブラシをウィングが陰唇にあたるまで挿入する。
5. 透明の外筒を片手で保持し、もう片方の手でプランジャーをカチッと音がするまで押し込む。
6. プランジャーを5回回す。1回転する毎にカチッという音がする。5回転したらエヴァリンブラシをゆっくり抜く。
7. 片手で透明の外筒を持ち、もう片方の手でプランジャーを引き、ブラシを透明の外筒内に入れる。ブラシ先端に触れないように注意すること。

8. 透明の外筒からブラシが出ていない事を確認した後、キャップをカチッと音がするまではめ込む。
9. 検査機関等に提出する際は、入っていたケースなどを利用し提出する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

使用前に包装が破れている場合、開封済である場合には使用をやめること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光の当たる場所を避けて常温で保管すること。

<使用期限>

外装に記載

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 原田産業株式会社

電話番号: 06-6244-0978

外国製造業者: ロバース社 (Rovers Medical Devices B.V.)

国名: オランダ