

水浸しの床、解消！



New!



こんな手術に使えます！

- ✓ 膝、肩などの関節鏡手術
- ✓ TURP(経尿道的前立腺切除術)
- ✓ 移植手術
- ✓ 一般外科手術
- ✓ 形成外科手術
- ✓ ラパロ手術
- ✓ 心臓胸郭部手術
- ✓ 膀胱鏡手術
- ✓ etc

疲労軽減と液体吸引を兼ねた革新的なマットです。

- ✓ 濡れた床面での転倒を防ぐことができます。
- ✓ 床面に落ちた血液・灌流液などを強力に吸引できるため感染制御の一助となります。
- ✓ クッション性の高い素材を用いることで術者の疲労を軽減し、快適な手術室環境を作ることができます。
- ✓ 現在お使いのサクシオンに繋ぐだけですぐにお使い頂けます。
- ✓ 従来よりも手術室が汚れにくくなるため、術後の清掃が簡単になり手術室の回転数向上に貢献します。

ご使用方法



1. サクシオンにサクショナーマットのホースを接続します。

2. ドレープを捻って、サクショナーマットの上の一箇所に液体が流れるよう道を作ります。



3. ドレープが床面から15～30cmになるよう調整し、クランプやスポンジ鉗子など重みのあるもので挟みます。

4. サクシオンの吸引が開始したことを確認し、ご使用下さい。



* マットの色は実際のものとは異なります。

品番	商品名	サイズ	入数	希望小売価格(単価)
38017-003	エコサクショナーマット	全長91×142cm(マット71×101cm)	8枚/箱	¥70,400.-(¥8,800)

* デモが可能です。お気軽にお近くの販売店様までお問い合わせ下さい。

製造販売業者

販売代理店



原田産業株式会社

〒542-0081大阪府大阪市中央区南船場2-10-2
Tel : 06-6244-0978 Fax : 06-6244-0977
<http://medical.haradacorp.co.jp/>