

Product Info

製品情報

製品コード	製品名	梱包内容	JANコード
38045-001	ATMOS® C051 ソラックス 電動式低圧吸引器	本体、携帯用ストラップ、 携帯用ストラップホルダー×2、 ACアダプター、電源ケーブル	4931839804506
38045-002	万能ブラケット	1個	4931839804513
38045-003	携帯用ストラップ	1本	4931839804520
38045-004	携帯用ストラップホルダー	2個	4931839804537
38045-101	ATMOS® チューブシステム	10本 / 箱	4931839804575
38045-102	ATMOS® C051 キャニスター	10個 / 箱	4931839804582

〔 認証 / 届出情報 〕
一般名称：電動式低圧吸引器
一般名称：カテーテルコネクタ
一般名称：排液バッグ

販売名：ATMOS® C051ソラックス電動式低圧吸引器
販売名：ATMOS® チューブシステム
販売名：ATMOS® C051 キャニスター

認証番号：228AOBZX00005000
届出番号：27B1X00021000074
届出番号：27B1X00021000073

クラス分類：II管理医療機器
クラス分類：I一般医療機器
クラス分類：I一般医療機器

仕様 C051 ソラックス電動式低圧吸引器本体



電源定格	AC100V～240V、50/60Hz
直流電圧	12V DC±2%、最大5A
充電式内蔵バッテリー	リチウムイオン電池
電源入力	最大60W
バッテリー充電/稼働時間	充電時間：約2時間 / 稼働時間：最大約16時間
重量	本体：1.06kg、キャニスター：0.28kg
寸法	本体：高さ164×幅206×奥行95mm キャニスター接続時奥行142mm
吸引圧	最大-102cmH ₂ O (-10KPa又は-100mbar)
吸引量	最大5L / 分
メモリー容量	治療データ記録のための内蔵メモリー：2.5MB 最大12日間の記録が可能です
キーロック機能	設定した圧力が一定時間変更されなかった場合、 誤操作防止のためタッチパネル操作がロックされます
保守点検	年1回保守点検を実施する必要があります

製品は常に改良が行われており、仕様や形状がカタログと相違することがありますので予めご了承ください。

販売代理店

海外製造業者

製造販売業者



原田産業株式会社

メディカルチーム
〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場2-10-2
Tel: 06-6244-0978 Fax: 06-6244-0977
<http://medical.haradacorp.co.jp/>

Ver.1.2 201705_500

胸腔ドレナージのイノベーション

ATMOS® C051 Thorax

ATMOS® C051 ソラックス 電動式低圧吸引器



客観的かつ定量的な評価が可能

- 胸腔内圧・エアリーク流量のリアルタイム表示

業務負荷の軽減


- チューブ内を自動洗浄するためミルキングが不要
- 接続が簡単で使いやすいチューブ・キャニスター

安全性の確保

- アラーム音とともにエラー内容対処法を表示
- 疎水性細菌フィルターにより排液の本体側への流入防止

胸腔内圧、エアリーク流量のリアルタイム表示


流量はリアルタイムでデジタル表示されるため客観的かつ定量的に評価でき、患者の状態をより正確に把握できます。ドレナージチューブの抜去時期を的確に判断することができます。

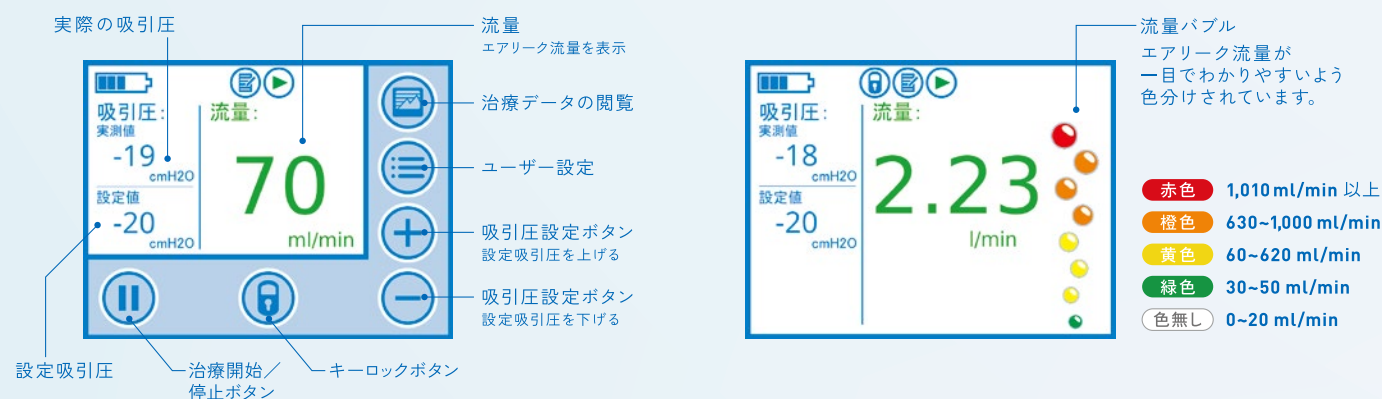

エアリーク流量の経過観察

エアリーク流量をShort timeモード/Long timeモードで記録・観察することができます。データはUSBメモリーに転送できます。

表示スケール Short timeモード：30秒
Long timeモード：60分~12日間

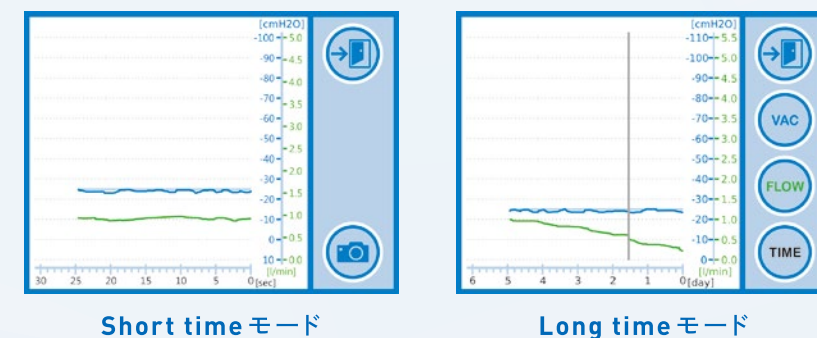

エラー内容通知アラーム

設定吸引圧に一定時間以上達しない、本体が傾いたなど、何らかの異常が発生した場合にはエラー内容が表示されます。エラー原因解決のための対処法がわかりやすく表示されますので素早く対処することができます。



アラーム通知の一例

チューブシステムが正しく接続されていない場合や屈曲がある場合に表示されます。

簡単な回路管理

チューブ内を自動洗浄するフラッシング機能により排液の滞留や詰まりが解消されるためミルキングが不要となります。キャニスターへのチューブの接続もルアーロックを回すだけで簡単に確実に接続することができます。

昼/夜モード

光センサーが使用環境の明るさを感知し、周囲の明るさに応じてディスプレイの照度を自動で調整します。



安全で使いやすいキャニスター

ワンタッチでキャニスターの取り外しが行えます。キャニスター内のポンプ接続部に設置された疎水性細菌フィルターが排液のポンプ内部への流入を防止するため、本体の故障・汚染の心配がありません。

コンパクト・携帯可能

重量はわずか1.3kgと軽量でバッテリー駆動(最大16時間)が可能なので、携帯して移動することができ、患者の早期離床を促します。移動の際には点滴台に固定したり、付属のストラップを使用して肩から吊り下げることができます。

静音で快適な病室

水封がないため気泡発生音がありません。モーター音もほとんどなく、従来タイプのドレナージと比べて静かで快適です。

about 機能説明
ATMOS® C051 Thorax