

SHARPAK™

シャーパック 感染性器材廃棄容器



事故防止の安全設計




針刺し事故防止のための廃棄システム

シャープスコンテナとして必要な性能が厳格に定められたBS7320（イギリス規格）、NF X30-500（フランス規格）、AS4031（オーストラリア規格）に合格し、医療廃棄物の貯蔵運搬に関する国連規格UN3291にも準拠した世界最高水準の製品です。


特 徴

- 1** 蓋はスライドロック機構になっており、安全で確実な開閉ができます。
中の物が飛び出したりこぼれ落ちたりするのを防止できます。
- 2** 針を捨てる時、開口部に直接ふれずに捨てる事が可能です。
独自の構造により、血液に接触するのを防ぐことができます。
- 3** トレイとの組み合わせにより、ベッドサイドまで安全に持ち運びができます。
専用トレイにコンテナを固定すれば回診車で移動中でもコンテナが転ぶ心配がありません。
- 4** 壁面やカート等に簡単に取り付けが可能です。
専用のアタッチメントを用意しております。
- 5** 自然に優しく、そのまま安全に焼却できます。
ポリプロピレンとポリエチレンを使用していますので、焼却しても無害です。
- 6** 容器はウォッシャーディスインフェクターで消毒、
オートクレーブで滅菌を行うことができます。
134℃4分の滅菌で行えば変形はありません。
- 7** 厚いプラスチック壁が安全を守ります。
イギリスでの貫通テスト基準などをクリアした最高水準のコンテナです。

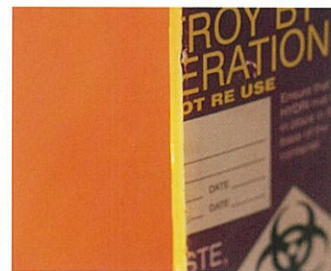


容器の厚み

蓋の開閉方法（スライドロック機構）

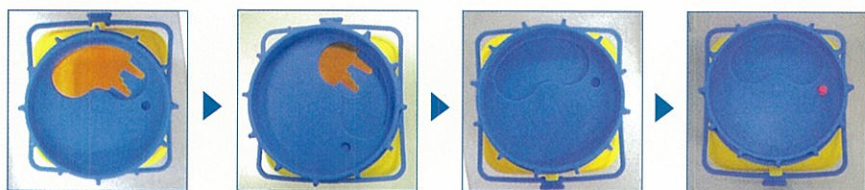

- 1** 全開
針を捨てる時
- 2** 半開
針を捨てる時
- 3** 仮ロック（1回目）
移動、保管のとき
- 4** 完全ロック（2回目）
容器を破壊するとき
※完全ロックをしたとき
には赤い目印が出ます。

針の取り外し方法

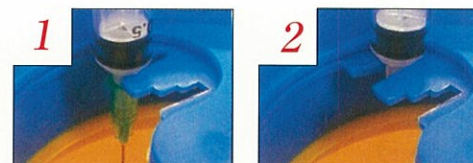

- 1** シリンジと針の結合部を
U字部分に差し込む
- 2** そのまま奥へスライドして
針を取り外す

アクセサリとの組み合わせ 使用例



シャープパックコンパクト・18・35と処置トレイ



シャープパック60とブラケットキット

シャープック コンパクト 0.5L



往診や在宅で自己注射を行う際の注射針とシリンジの廃棄に適しており、使用後の注射器材を安全に廃棄いただけるように、使いやすく持ち運びやすいコンパクトな大きさになっております。



上からのアングル

対応アクセサリ



コンパクト
スタンド



処置トレイ

シャープック 18 1.58L



少ない使用量で持ち運びに適した容器として作られており、コンパクトな形状で多用途に使用できます。使い易いように蓋は予め組み立てられております。ブラケットキットを使用することにより壁やカートにも取り付けられます。



上からのアングル

対応アクセサリ



ブラケット
キット



処置トレイ

シャープック 35 3.5L



シャープック18と同様に持ち運びに適した容器として作られており、開口部が広く翼状針等のチューブ類やシリンジの廃棄に最適です。処置トレイと組み合わせて使用することによりベッドサイドで安全に廃棄できます。




上からのアングル

対応アクセサリ



ブラケット
キット

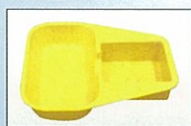

処置トレイ

シャープック60/120/220 6.0L/12.0L/22.0L



投入口が広いので、針やシリンジだけではなく、大きめの廃棄物や大量処理にも適しております。安定感があり、透析室や手術室、ナースステーションでの作業時に最適です。




上からのアングル

対応アクセサリ



ブラケット
キット

シャープック XL 26.3L

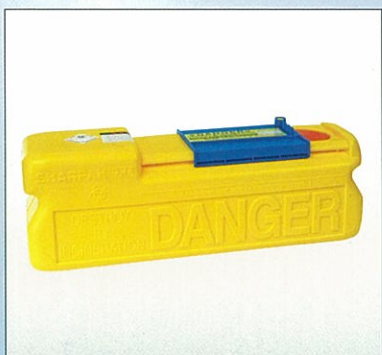

手術室の鋭利な感染性器材を廃棄するのに適したコンテナです。長い廃棄物や大量の廃棄物を入れるのに適した縦長の容器にスライド式の大きな開口を設けております。



上からのアングル

抗ガン剤などのアンブル片などに シャープック ハイドライ



シャープックハイドライ コンテナシリーズは細胞毒性の薬品の付着した感染性器材(抗がん剤等の残剤のあるアンブル片等)の廃棄を効率的に安全に行えるように作られました。搬送中にコンテナ内から液が漏れないように毒性薬液を吸収する吸着シートを内蔵しています。



吸着シート

シャーパック 仕様

CD	製品番号	製品名	容積 (L)	上限容積 (L)	サイズ (H×D×W)	限度吸着量 (mL)	数量/1箱
03061-900	SU06202	シャーパック コンパクト	0.5	0.39	186 × 67 × 67	–	24
03061-901	SU06495	シャーパック 18	1.58	1.27	210 × 104 × 104	–	48
03061-902	SU03500	シャーパック 35	3.5	2.63	195 × 177 × 177	–	40
03061-903	SU02600	シャーパック 60	6.0	4.5	229 × 205 × 205	–	25
03061-904	SU02200	シャーパック 120	12.0	9.6	325 × 239 × 239	–	15
03061-905	SU02400	シャーパック 220	22.0	17.6	383 × 297 × 297	–	8
03061-906	SU06548	シャーパック XL	26.3	19.2	220 × 660 × 190	–	6
03061-907	SU06604	シャーパック ハイドライ 18	1.58	1.27	210 × 104 × 104	80	48
03061-908	SU02610	シャーパック ハイドライ 60	6.0	4.5	229 × 205 × 205	300	25
03061-909	SU02210	シャーパック ハイドライ 120	12.0	9.6	325 × 239 × 239	500	15
03061-910	SU02410	シャーパック ハイドライ 220	22.0	17.6	383 × 297 × 297	1,000	8

アクセサリ

CD	製品番号	製品名	対応製品	数量/1箱
03061-911	SU07500	コンパクトスタンド	コンパクト	1
03061-913	SU06211	処置トレイ	コンパクト/18	5
03061-914	SU03501	処置トレイ	35	5
03061-915	SU06500	ブラケットキット	18	1
03061-916	SU05000	ブラケットキット	35/60/120/220	1

- *本品はディスプレイ製品ですので、再使用はしないで下さい。
- *廃棄物が上限に達したら、蓋を完全ロックし、速やかに廃棄して下さい。
- *廃棄物を別の容器に移し替えたりしないで下さい。
- *本品は未滅菌品です。
- *本品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。
- *製品の色は、印刷インキの性質上、実際の色とは若干異なる場合があります。


原田産業株式会社
 メディカル事業部
 〒542-0081
 大阪市中央区南船場2丁目10番2号
 TEL.06-6244-0978 FAX.06-6244-0977
<http://medical.haradacorp.co.jp/>

製造元 **AMCOR** アムコ社 (英国)

製品の仕様及び仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
 製品の色は印刷インキの性質上、実際の色とは若干異なる場合があります。