

機械器具(21) 類別名称 内臓機能検査用器具
管理医療機器
一般的名称:電子式診断用スパイロメータ JMDN コード:13680002
(一般的名称:パルスオキシメータ JMDN コード:17148010)

「スパイロドック」の付属品 ディスポーザブルタービンフロー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

単一患者のみの使用で再使用しないこと。

* 【形状・構造及び原理等】

1. 構成
ディスポーザブルタービンフロー
2. 形状
ディスポーザブルタービンフロー



〈原材料〉

ボール紙(血液、体液等生体に接触する部分のみ)

3. 機能
タービンハウスに挿入して使用する。呼吸が通過すると翼が回転する。
(単回使用)
4. 原理
接続する機器の付属文書を参照すること。

【使用目的又は効果】

接続する機器の付属文書を参照すること。

* 【使用方法等】

本品は、スパイロドック (認証番号: 224AKBZX00023000) と組み合わせて使用する。

- (1) タービンハウスへ本品を取り付ける。
- (2) 測定後は、本体の電源を切り、本品を取り外す。本品は単一患者のみの使用で廃棄する。

* 【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

本品に毛髪、ゴミ等が付着している場合タービン内の翼の回転を妨げるので、除去してから使用すること。

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:原田産業株式会社

電話番号:06-6244-0978

外国製造業者:えむあいあーる めでいかる いんたーなしょなる りさーち
(MIR Medical International Research)

国名:イタリア