

機械器具(21) 類別名称 内臓機能検査用器具
管理医療機器 特定保守管理医療機器
一般的名称:電子式診断用スパイロメータ JMDNコード:13680002
(一般的名称:パルスオキシメータ JMDNコード:17148010)

「スパイロドック」の構成品 パルスオキシメーター

【警告】

1. 手術室、引火性液体／洗剤がある場所、または引火性麻酔ガス(酸素または窒素)のある場所で使用しないこと。
2. 風の影響がある場所、熱源／冷源、直射日光、その他の光源／ほこり、砂、その他の化学物質等の影響がある環境で使用しないこと。[故障の原因となる]

【形状・構造及び原理等】

1. 構成
パルスオキシメーター
2. 形状
パルスオキシメーター



3. 機能
パルスオキシメータとして使用する際に、SpO₂ポートに接続する。指を入れて測定する。
4. 原理
接続する機器の付属文書を参照すること。

【使用目的又は効果】

接続する機器の付属文書を参照すること。

【使用方法等】

本品は、スパイロドック(認証番号:224AKBZX00023000)と組み合わせて使用する。

- (1) 本品を本体に接続し、患者の指を挿入する。
- (2) 測定後は、本体の電源を切り、本品を取り外す。

【使用上の注意】

・他の医療機器とは組み合わせて使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

高温、多湿、直射日光の当たる場所に保管しないこと。

〈耐用期間〉

7年[自己認証(当社データ)による]

【保守・点検に関する事項】

〈使用者による保守点検事項〉

軽く湿らせた柔らかい布で全体を清掃すること。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:原田産業株式会社

電話番号:06-6244-0978

外国製造業者:えむあいあーる めでいかる いんたーなしょなる りさーち
(MIR Medical International Research)

国名:イタリア