

機械器具(25) 類別名称 医療用鏡
一般医療機器
一般的名称:気管支鏡用吸引チューブ JMDN:16399000

サーバック吸引チューブ

再使用禁止

*【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・包装が破損、汚損している場合や、製品に破損などが認められる場合は使用しないこと。

〈併用医療機器〉

レーザー治療器、電気手術器と併用しないこと。【使用上の注意】〈相互作用〉の項参照。

**【形状・構造及び原理等】


1. 構成

チューブ

2. 形状

チューブ

吸引ポンプ接続口

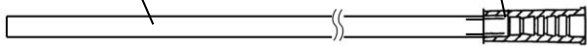

タイプ	チューブ長さ	外径	内径
77622	600.0mm	3.0mm	2.0mm
77632	600.0mm	2.7mm	2.0mm
77642	600.0mm	4.0mm	3.0mm
77642SC	300.0mm	4.0mm	3.0mm

〈原材料〉

チューブ:ポリカーボネート(タイプ 77632、77642、77642SC)
又はポリテトラフルオロエチレン(タイプ 77622)
(血液、体液等生体に接触する部分のみ)

3. 原理

市販のコネクターを取り付け、吸引ポンプに接続することにより、気管内の血液、分泌物等を吸引する。

【使用目的又は効果】

本品は、主として硬性気管支鏡を使用して気管及び気管支を手術及び処置する際に、外筒の管内に挿入し、市販の吸引ポンプに接続して血液、膿汁、その他の分泌物などを吸引するチューブである。

*【使用方法等】

1. 吸引ポンプ接続口に市販のコネクターを取り付け、吸引ポンプに接続する。
2. チューブを硬性気管支鏡の外筒内に挿入する。
3. チューブを操作し、チューブ先端を対象物まで進める。
4. 吸引ポンプの操作方法に従って吸引する。
5. 使用後は適切に廃棄する。

*【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・開封後はすぐに使用すること。
- ・過度に引っ張るような負荷やチューブを押し込むような負荷、チューブを折り曲げるような負荷は加えないこと。

〈相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関する事)〉

【併用禁忌(併用しないこと)】

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
レーザー治療器 電気手術器	本品の使用部位の近傍でレーザー治療器や電気手術器を使用しないこと。	発火、発火による気道熱傷等の恐れがある。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光の当たる場所を避けて常温で保管すること。

〈使用期限〉

外装に記載

**【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者: 原田産業株式会社

電話番号: 06-6244-0978

外国製造業者: ノバテック社(NOVATECH S.A.)

国名: フランス