


HPV検査用採取ブラシ
エヴァリンブラシ

evalyn[®]brush

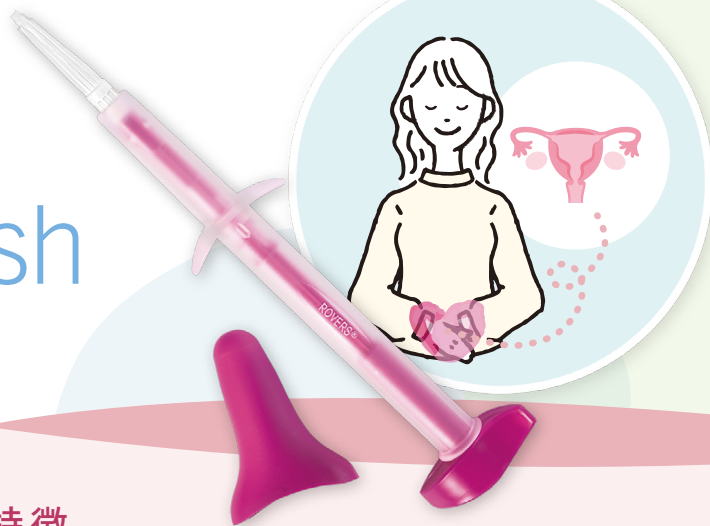

製品特徴



ブラシ

有効な検体を採取できるよう設計されています。(99.9%)※1



ストッパー

ストッパーが肌に当たるまで挿入することで、一定の位置で検体を採取することができます。



ハンドル

ハンドルを回転させる毎に「カチッ」という手ごたえがあるため、必要な回転数を数えることができます。



持ち手・キャップ

持ち手内にブラシを格納し、キャップをすることで、採取した検体やブラシに誤って触れてしまうことを防げます。

※1 Ejegod DM, Pedersen H, Pedersen BT, Serizawa R, Bonde J. Operational experiences from the general implementation of HPV self-sampling to Danish screening non-attenders. *Prev Med.* 2022;160:107096. doi:10.1016/j.ypmed.2022.107096

使用方法

- 01 使用前に手を洗い、清潔な状態にします。
- 02 エヴァリンブラシをパッケージから取り出し、キャップを外します。
- 03 ブラシを格納したまま、ストッパーが陰唇にあたるまで膣に挿入します。
- 04 ハンドルを押して膣内でブラシを出し、ハンドルを回してブラシを5回転させます。
- 05 ブラシを出したままエヴァリンブラシを膣からゆっくり抜きます。
- 06 ハンドルを引き下げてブラシを格納し、キャップをしてパッケージの中に戻します。
※ 検査機関等に提出する際は、同封の資材等を使用します。

製品情報

商品コード	03060-200
販 売 名	エヴァリンブラシ
販 売 単 位	40本/箱
クラス分類	一般医療機器 (製造販売届出番号: 27B1X00021000057)
寸 法	全長: 175mm
原 材 料	ポリエチレン、ポリプロピレン
滅 菌	個包装滅菌済
JANコード	4931839803653

「Evalyn」は、オランダ Rovers Medical Devices B.V.の登録商標または商標です。
本カタログは制作時点での情報に基づいています。
製品の選定や使用に際しては、最新の電子化された添付文書等も併せてご確認ください。

製造販売元



原田産業株式会社

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-10-2
Tel: 06-6244-0978 Fax: 06-6244-0977
<https://medical.haradacorp.co.jp/>

外国製造業者



C10057-001-01