

機械器具(54) 類別名称 医療用捲綿子
一般医療機器
一般的名称: 医科用捲綿子 JMDNコード: 10172000

オーセレックスブラシ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



〈原材料〉

ポリエチレン、ポリプロピレン

2. 原理

本品は、先端のブラシで口腔内の細胞を採取する。ブラシは取り外すことができる。

【使用目的又は効果】

本品は、口腔粘膜疾患細胞診のための試料を採取する器具である。

【使用方法等】

1. 包装から本品を取り出す。
2. 採取する部位に対して、ブラシ毛を直角に当てる。
3. 軽く押し当てながら同じ方向に10回転させる。(口腔底部は少なくとも5回転、可能なら10回転が望ましい。)
4. 本品を口腔外へ取り出す。
5. リムーバーチューブを押し出して、液状化検体細胞診用固定保存液のバイアルにブラシを入れる。
6. バイアルのキャップをしっかりと閉める。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・開封後は速やかに使用すること。
- ・自己採取には使用しないこと。
- ・製品への強い負荷や他器具との接触等により、ブラシやリムーバーチューブが破損脱落し、誤飲する恐れがあるため注意すること。
- ・ブラシが使用中に口腔内で外れてしまった場合は、使用を中止し、速やかに取り出すこと。
- ・細胞を採取する際に、強く押し当てると組織を傷つけ出血することがあるので、過剰な力をかけないこと。
- ・細胞診標本作製時にブラシを軸から取り外す場合には、固定保存液が飛散しないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

水濡れに注意し、高温多湿、直射日光を避けて保管すること。

〈使用期限〉

外装に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 原田産業株式会社

電話番号: 06-6244-0978

外国製造業者: ロバース社

(Rovers Medical Devices B.V.)

国名: オランダ