

子宮内膜組織採取器具

Clear Pipette

クリアピペット

特 徴

- ✓ 麻酔不要で外来・クリニックでも使用可能
- ✓ ピペット抜去前採取で
頸部細胞によるコンタミネーション防止
- ✓ 4孔構造で効率的な検体採取が可能
- ✓ 細胞診・組織診共に使用可能
- ✓ ラテックスフリー設計

製品情報は
コチラ




先端拡大写真

製品の目的と適用について


- ▶ 本製品は、プランジャーを引くことによりシース内に陰圧がかかり、先端の孔から子宮内膜組織等を採取します。
- ▶ 子宮内膜の細胞診及び組織診等にご使用いただけます。

使用方法


子宮腔の深さと方向を事前に確認すること。

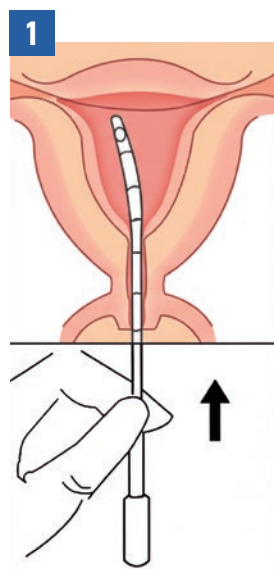


1
プランジャーを
所定の位置まで挿入。

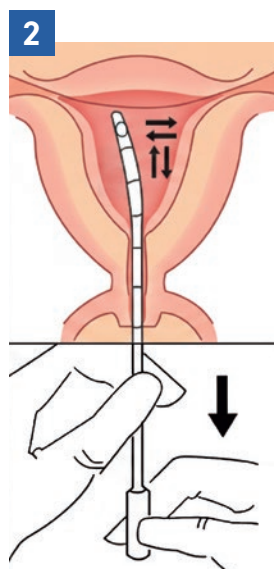

2
シースを保持し
プランジャーが止まるまで引き、
シースを回転。

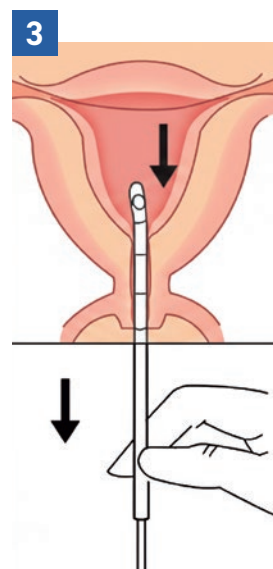

3
プランジャーを引いたまま
本品を体外に取り出す。

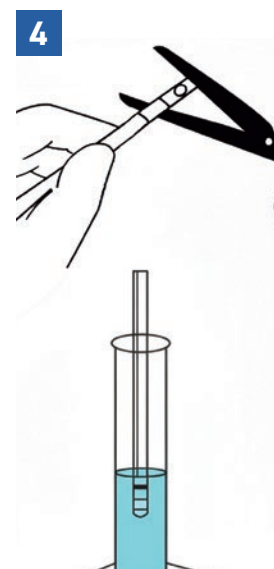

4
シース先端を切断し、
プランジャーを前方に押し込んで
採取した組織を回収。

製品仕様

項目	内容
商品コード	38024-000
商品名	クリアピペット
シース長	235mm
外径	3.1mm
材質	ポリプロピレン
滅菌方法	エチレンオキシドガス滅菌
梱包形態	25本入/箱

一般医療機器 一般的名称：婦人科用剥離子
医療機器届出番号：27B1X00021000100

※本カタログは制作時点での情報に基づいています。

製品の選定や使用に際しては、最新の添付文書等も併せてご確認ください。

【製造販売元】



原田産業株式会社

メディカルチーム
〒542-0081 大阪市中央区南船場2-10-2
TEL 06-6244-0978
<https://medical.haradacorp.co.jp>

【販売代理店】

【販売元】



原田三誠メディカルサプライ株式会社

A Group of HARADA CORPORATION

〒564-0032 大阪府吹田市内本町3-26-29
TEL 06-6318-2318 FAX 06-6318-2317
<http://www.hsms.co.jp>