

Dr.Arabin Pessary

ドクターアラビン ペッサリー



- 子宮頸部を適切に支えます
- 帯下が排出されやすいよう穴を設けています
- 医療用シリコンを使用しているため生体適合性に優れ、長期間安心してご使用頂けます

使用方法

1



滅菌手袋を使用し、本品に抗生物質の入ったクリーム等の潤滑剤を塗布します。

2



患者を碎石位にさせ、本品を半分に折りたたんで腔円蓋まで挿入します。挿入の向きにご注意ください。上方部内径が子宮頸部側です。

3




子宮頸部が上方部内径に入り、下方部外径が骨盤底によって支持されるように留置します。

4



経腔エコーを用いて本品が正しく留置されているか確認します。

製品情報

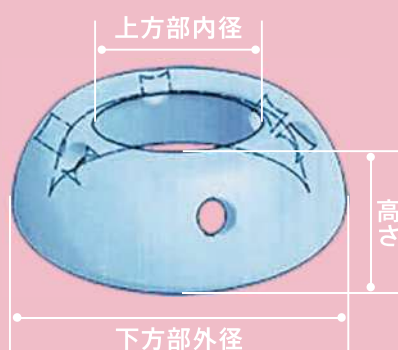

商品コード	商品名	サイズ (mm)			JAN コード
		下方部 外径	高さ	上方部 内径	
38043-211	ベッサリー穴あり 65/17/32	65	17	32	4931839804391
38043-212	ベッサリー穴あり 65/17/35	65	17	35	4931839804407
38043-201	ベッサリー穴あり 65/21/32	65	21	32	4931839804377
38043-202	ベッサリー穴あり 65/25/32	65	25	32	4931839804384
38043-213	ベッサリー穴あり 65/21/35	65	21	35	4931839804414
38043-214	ベッサリー穴あり 65/25/35	65	25	35	4931839804421
38043-215※	ベッサリー穴あり 65/30/35	65	30	35	4931839804438
38043-216	ベッサリー穴あり 70/17/32	70	17	32	4931839804445
38043-217	ベッサリー穴あり 70/17/35	70	17	35	4931839804452
38043-218	ベッサリー穴あり 70/21/32	70	21	32	4931839804469
38043-219	ベッサリー穴あり 70/21/35	70	21	35	4931839804476
38043-220	ベッサリー穴あり 70/25/32	70	25	32	4931839804483
38043-221	ベッサリー穴あり 70/25/35	70	25	35	4931839804490

本品のサイズは医師の診断に基づいて決定してください。

※38043-215は在庫限りで販売終了いたします。

一般的名称：骨盤臓器脱用ベッサリー 販売名：Dr. Arabin ベッサリー 医療機器認証番号：227AKBZX00110000 クラス分類：II 管理医療機器

製品は常に改良が行われており仕様や形状がカタログと相違することがありますので予めご了承ください。

販売代理店

海外製造元

製造販売元



原田産業株式会社

メディカルチーム

〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場2-10-2
Tel: 06-6244-0978 Fax: 06-6244-0977
<http://medical.haradacorp.co.jp/>